


KÉZI NAGYFREKVENCIÁS KÉSZÜLÉK


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

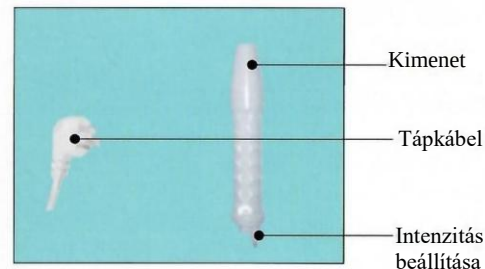

Kiegészítők



Tartó

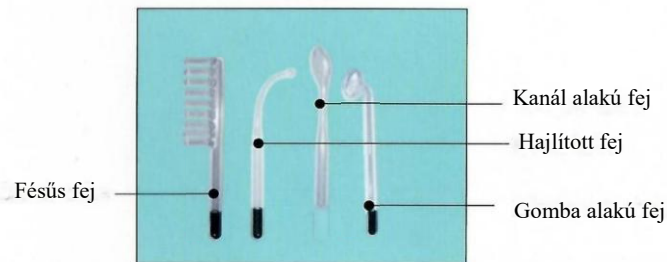

Üveg cső

Főbb utasítások

A nagyfrekvenciás elektroterápia a szépségápolás fontos eszköze. Ez egy üveg elektróda csövön keresztül történik, amely nagyfrekvenciás áramot termel, és az arcra kerül, így érve el a kezelés eredményét.

1. Segít az idegek nyugtatásában és fájdalomcsillapító hatású.
2. Ózont hoz létre a sterilizáláshoz, segíthet a sebgyógyulásban és a pórusok összehúzásában.
3. Javítja a szekréciót, a pH-értéket, neutralizálja a bőrt.
4. Serkenti a vérkeringést és javítja az anyagcserét.
5. Anti-aging, ránceltávolító és feszesítő funkcióval rendelkezik.

Használati útmutató:

1. Közvetett módszer:

- (1). Csavarja az üveg csövet a tartóba.
- (2). Kérje meg az ügyfelet, hogy tartsa a kevés hintőporral meghintett üvegcsövet. Kapcsolja be a gépet, és az elektromosság a kezeken keresztül az egész testen áthalad.
- (3). A kozmetikusok az ügyfél arcát a nyaktól az állig és a szemek szélétől a homlokig masszírozzák.
- (4). Kérjük, állítsa az intenzitást 0-ra. Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, és vegye ki az üvegcsövet a tartóból.

Ez a módszer alkalmas száraz és idősödő bőrre.

2. Közvetlen módszer:

- (1). Kérjük, először kenje fel az esszenciát és a krémet az arcra, majd a kozmetikus fogja a fémlapot, és helyezze az üvegcsövet az ügyfél arcára. Kapcsolja be a gépet.

(2). Masszírozza az üvegcsővel "Z" alakban vagy spirálban az ügyfél arcát, végezze a kezelést a következőképpen, homlok-■ orr - * - az arc jobb oldala - • - áll ~ * az arc bal oldala - * orr-* homlok.

(3). Kérjük, állítsa az intenzitást 0-ra. Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, és vegye ki az üvegcsövet a tartóból.

Ez a módszer kiváló zsíros bőrre.

3. Szikrázó módszer:

(1). Takarja le az ügyfél szemét egy nedves ruhadarabbal, és érintse meg az arcát az üvegcsővel a gyulladt terület oldalán. Első alkalommal a kezelés kevesebb, mint 10 másodpercig tartson.

(2). Normális, ha az arc üvegcsővel való érintésekor szikrák keletkeznek.

(3). Kérjük, állítsa az intenzitást 0-ra. Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, és vegye ki az üvegcsövet a tartóból.

Ez a módszer alkalmas a fájó, gyulladós és sebes bőrre..

4. Hajápolási módszer:

(1). Használja a fésűs csövet az epilátorral együtt.

(2). Mozgassa a fésűs csövet a haj növekedésének irányába.

(3). Kérjük, állítsa az intenzitást 0-ra. Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, és vegye ki az üvegcsövet a tartóból.

A módszer a bőrfelszín stimulálására, a tüszőgyulladás csökkentésére és a hajnövekedés javítására szolgál.

Figyelmeztetések:

1. A túlzott stimuláció elkerülése érdekében takarja le az érzékeny bőrt egy puha ruhadarabbal.
2. Ne helyezze egy helyre 10 másodpercnél hosszabb időre.
3. Ez a kezelés nem alkalmas terhes nők és pacemakerrel rendelkező személyek számára.
4. A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy az üveg cső fel van-e szerelve a készülékre. Ha kész, állítsa az intenzitást O-ra'.
5. Szeplős és foltos bőr nem kezelhető a készülékkel.

Tartozékok jegyzéke

Megnevezés	Egység	Db	Megjegyzések
Tartó	szett	1	
Üveg fej	szett	1	4 darabból
Útmutató	Db	1	

Műszaki adatok:

Feszültség: ACQ110V Q220V □ 230V Q240V

Üzemi frekvencia: 50-60HZ

Teljesítmény: 10W.

Méret: 33x21x6 cm

Súly: 1 kg

Fontos biztonsági tudnivalók

1. Kérjük, ne szedje szét a készüléket, és ne próbáljon meg semmilyen más, a kézikönyvünkben nem szereplő műveletet végrehajtani. Minden javítási munkát szakszemélyzetünknek kell elvégeznie.
2. Ne szerelje össze vagy módosítsa ezt a berendezést, ha víz közelében tartózkodik, vagy ha a keze nedves. Vigyázzon, hogy ne öntsön rá folyadékot.
4. Kérjük, húzza ki a dugót az aljzatból, ha az alább felsorolt feltételek bekövetkeznek. Vegye fel a kapcsolatot a professzionális szervizzel.
 1. A készüléket folyadékkal öntötték le.
 2. A készülék szokatlan szagot áraszt, füstöl, vagy hangos és hangos zajt csap.
 3. A kábel elszakadt.
 4. A készülék leesett és eltört.
6. Kérjük, ne tegyen semmit a kábelekre, ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a kábelre..
7. Használat után húzza ki a tápkábelt saját biztonsága érdekében.
8. Ne dugjon be semmit a tartozék jack csatlakozójába, különben tüzet vagy áramütést okozhat. Ha valami beleesik a készülékbe, kérjük, ne szedje ki, hanem azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy cégünkkel
9. Kérjük, ne tegye a készüléket instabil tárgyra, elkerülve a felborulást és a sérülést.
10. Cégünk fenntartja a jogot, hogy a jelen kézikönyvben szereplő információkat előzetes értesítés nélkül módosítsa! Kérjük, kövesse a fenti utasításokat.